

イーメディカル ご利用ガイド

イーメディカルジャパン株式会社

はじめに |

このたびは、イーメディカルをご利用いただき、ありがとうございます。

イーメディカルは高血圧をはじめとした生活習慣病の治療・サポートを行っております。脂質異常症、痛風、アレルギーなどのお悩みもぜひご相談ください。


このサービスが、皆さまの日々の健康管理のお役に立てば幸いです。

利用料のお引き落とし日について |

お客さまが公式アプリの本登録を完了した日づけが毎月の月額利用料金の引き落とし日となります。


例：7月5日に本登録完了の方→毎月5日に月額利用料金の引き落とし

保険適用での診療・お薬の処方が必要な方は、診療・処方が行われた翌月の10日前後に診療・処方代金が別途引き落としとなります。

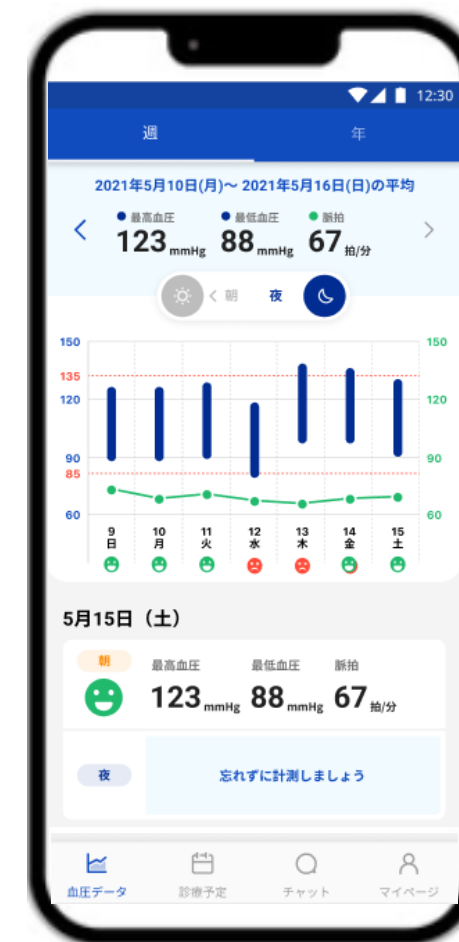

ご用意いただくもの | ※ 設定前に、お使いのスマートフォンのOSを、最新バージョンにしてください

- ・スマートフォン
- ・月額利用料支払いのためのクレジットカード
- ・メモ用紙、筆記具

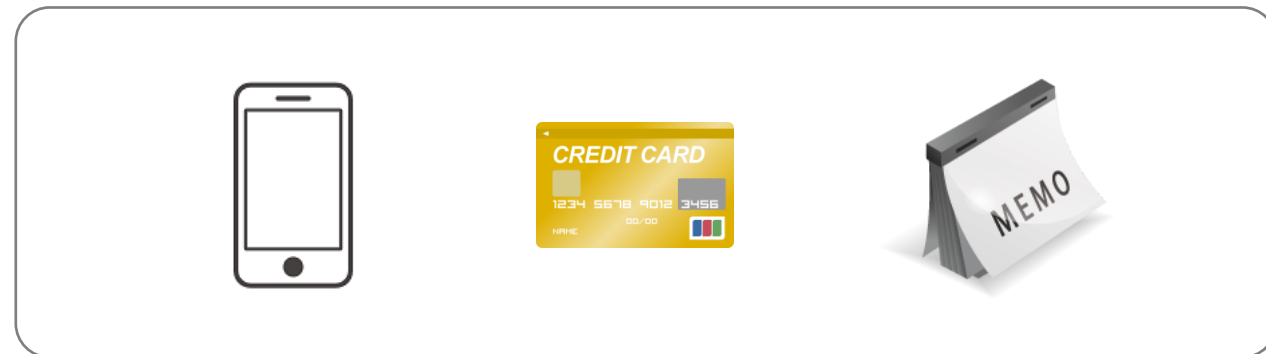


用語の説明 |

●公式アプリ



高血圧イーメディカルの公式アプリです。日々の血圧データの表示、オンライン診療、チャットなどの機能があります

●オムロンコネクトアプリ

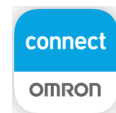


あなたの血圧データをスマートフォンへ簡単に転送するアプリです
(オムロンヘルスケア株式会社提供)

全体の流れ | ※ 設定前に、お使いのスマートフォンのOSを、最新バージョンにしてください

【手順1】 公式アプリのインストールと設定

- (1-1) お使いのスマートフォンに、公式アプリをインストールします
⇒ すでに公式アプリをお持ちの方は、この手順は不要です
- (1-2) 公式アプリに、お客様の情報を登録します

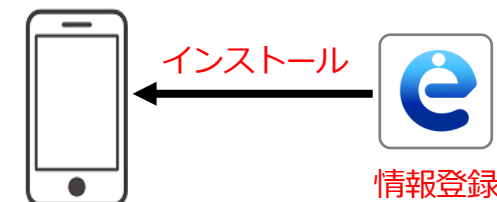


情報登録が完了すると、弊社から、貸与する血圧計をお届けいたします。
血圧計がお手元に届きましたら、手順2にお進みください。




【手順2】 オムロンコネクタアプリのインストールと設定

- (2-1) お使いのスマートフォンに、オムロンコネクタアプリをインストールします
⇒ すでにオムロンコネクタアプリをお持ちの方は、この手順は不要です
- (2-2) オムロンコネクタアプリに、お届けする血圧計を接続します

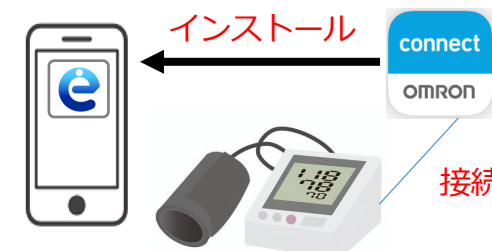

【手順3】 公式アプリとオムロンコネクタアプリを連携

- (3-1) スマートフォン内で、公式アプリとオムロンコネクタアプリを連携します

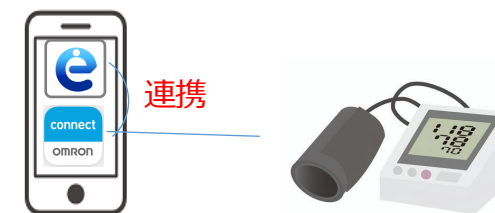

やってみましょう | 【手順1】公式アプリのインストールと設定

(1 - 1) お使いのスマートフォンに、公式アプリをインストールします。

⇒ すでに公式アプリをインストール済の方は、この手順は不要です

● iPhone用


こちらを
タップ



※スマホでご覧の方は、上記「こちら」をタップしてください
※うまくいかない場合は、アプリストアで「高血圧イーメディカル」を検索して下さい

● アンドロイド用

こちらを
タップ

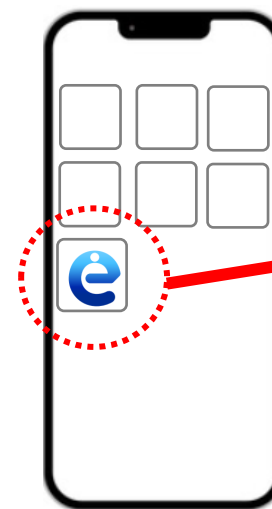

スマートフォンの
画面で、公式アプリを
ご確認ください

“イーメディカル”は通知を送信します。よろしいですか？
通知方法は、テキスト、サウンド、アイコンバッジが利用できる可能性があります。
通知方法は“設定”で設定できます。

許可しない


許可

【ご注意】通知について確認されたら、必ず「許可」または「OK」を選んでください！
これにより、チャット機能が使えるようになります

これで、公式アプリがインストールされました。(1 - 2) へお進みください

やってみましょう | 【手順1】公式アプリのインストールと設定

(1 - 2) 公式アプリに、お客さまの情報を登録します。

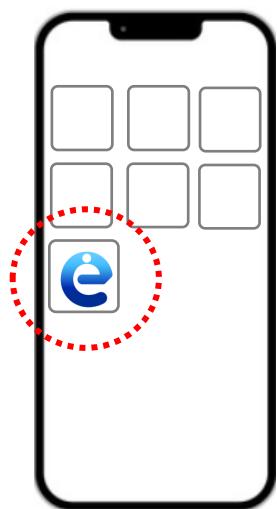

①公式アプリを起動



②メールアドレスと仮パスワードを入力して、「ログイン」をタップ


⇒ 既にログイン状態の場合は、この手順は不要です

・メールアドレス：
申込時にご登録いただいた
アドレス

・パスワード：
ご自身で設定・もしくは登録
アドレス等にお送りした
仮パスワード



②「本登録を行う」を
タップ

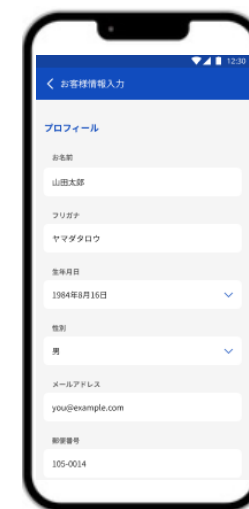

③お客様情報を入力し「次へ」を
タップ

※既に情報が表示されている場合は、
ここで修正も可能です

- ・お名前
- ・フリガナ
- ・生年月日
- ・性別
- ・メールアドレス
- ・郵便番号
- ・住所
- ・電話番号
- ・薬の配送先


次のページに続きます

やってみましょう | 【手順1】公式アプリのインストールと設定

(1 - 2) 公式アプリに、お客さまの情報を登録します。



④入力した内容を確認し「次へ」をタップ

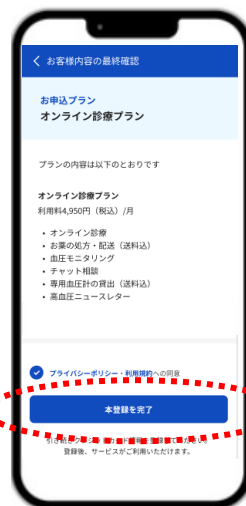

⑤利用規約に同意し「本登録を完了」をタップ



⑥クレジットカード情報を入力し、「次へ」をタップ



⑦入力した内容を確認し「確定」をタップ



⑧設定完了

これで、公式アプリの設定が完了しました。血圧計が届くのをお待ちください

弊社から、貸与する血圧計をお届けいたします。数日お待ちください。

お客様の情報登録完了を確認次第、血圧計を発送いたします。
※オムロンコネクト対応の血圧計がすでにお手元にある方は（2-1）へお進みください。



登録完了画面

血圧計がお手元に届きましたら、（2-1）へお進みください。

やってみましょう | 【手順2】オムロンコネクタアプリのインストールと設定

(2-1) お使いのスマートフォンに、オムロンコネクタアプリをインストールします。


⇒ 既にオムロンコネクタアプリをお持ちの方は、この手順は不要です



これで、オムロンコネクタアプリがインストールされました。(2-2)へお進みください。

やってみましょう | 【手順2】オムロンコネクトアプリのインストールと設定

(2-2) オムロンコネクトアプリに、お届けした血压計を接続します。

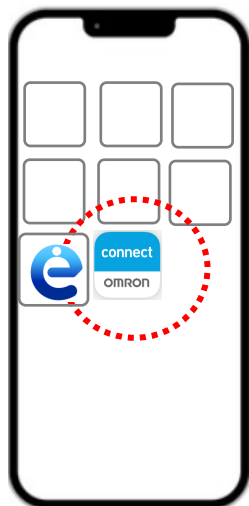

①オムロンコネクトアプリを起動



②画面に従って手続き

- ・使用地域の選択「日本」
- ・使用許諾に同意
- ・OMRON connect対応機器を「持っている」を選択



③画面に従って手続き

- ・「血压計」を選択
- ・血压計の ⇄ ボタン または Bluetooth ボタンを長押し
- ※血压計に「P」が表示されます



④画面に従って手続き

- ・血压計機種を選択
- ・生年月日・性別の入力
- ・「ペアリング」をタップ
- ※血压計機種は本体裏面に記載



⑤登録完了


アプリを終了せずに次のページにお進みください

次のページに続きます

やってみましょう | 【手順2】オムロンコネクタアプリのインストールと設定

(2-2) オムロンコネクタアプリに、お届けした血圧計を接続します。

⇒ 既にオムロンコネクタをお使いの方は、ユーザー名、メールアドレス、パスワードをご確認ください、次の手順で使します。

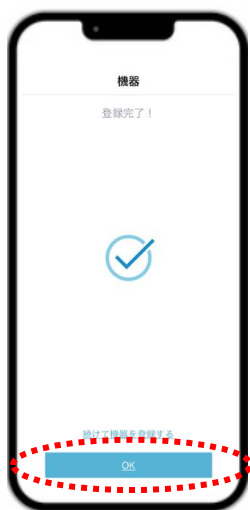

⑥ (前のページからの続きです)
血圧計登録完了画面で「OK」をタップ



⑦画面に従って手続き
・アプリの利用目的を選択
・「クラウドサービス」画面で、「登録して使う」を選択



⑧アカウント作成
・ご希望のユーザー名、メールアドレス、パスワードを設定



⑨設定したユーザー名、パスワードをメモ
※トラブルがあった際などの問い合わせで必要となります




⑩オムロンから届くメールを確認し、登録を完了してください

これで、オムロンコネクタへの情報登録が完了しました。【手順3】へお進みください。

やってみましょう | 【手順3】公式アプリとオムロンコネクタアプリを連携


(3-1) 公式アプリにとオムロンコネクタアプリを連携します。

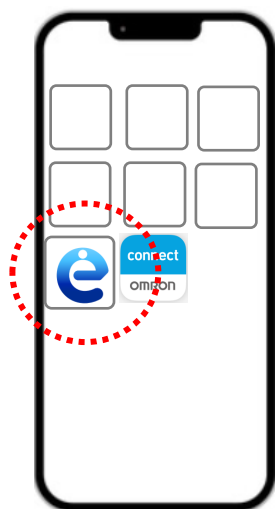

①公式アプリを起動



②「血圧計連携」を
タップ

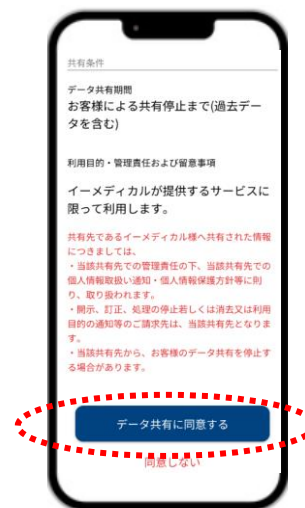

③オムロンコネクとイメ
ディカルとのデータ連携へ同
意する
※手順2のオムロンコネクタアカウ
ント作成ができていないとエラー
となります。



④設定完了

これで、すべての設定が完了しました

使ってみましょう | 主な機能のご紹介

● 血圧データ表示



週間／年間それぞれ、朝／夜のデータを切り替えてグラフで表示することができます。

● チャット



「医療チーム」チャットでは、測定データに関する相談ができます。「お問い合わせ」チャットでは、お支払い方法などの問い合わせが可能です。

● オンライン診療予約



ワンタッチで診療予約や過去の診療履歴を確認できます。

公式アプリ、設定に関するお問い合わせ

Eメール : support@e-medicaljapan.co.jp

イーメディカルジャパン株式会社